

Kamermodule met  
oproep- en aanwezig-  
heidsknop  
2920 ..

# GIRA

Oproepsysteem 834

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektrotechnische installatie-  
systemen  
Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald  
P.O. Box 12 20  
42461 Radevormwald  
Germany  
Tel. +49(0)21 95 - 602-0  
Fax +49(0)21 95 - 602-339  
www.gira.nl  
info@gira.nl

10410935 I00 / 01.04.2011

## Veiligheidsaanwijzingen

---

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kan er schade aan het apparaat, brand of andere gevaren ontstaan.

Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet aan de eindgebruiker worden overhandigd.

## Levering

---

Kamermodule met oproep- en aanwezigheidsknop (art. nr.: 2920 ..) voor montage in een inbouwdoos.

Neem de uitvoerige installatieinstructies in acht in de volledige handleiding, te vinden onder:  
[www.download.gira.de](http://www.download.gira.de)

## Garantie

---


De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/ installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center:

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Service Center  
Dahlienstraße 12  
42477 Radevormwald  
Deutschland

## Apparaataanzicht

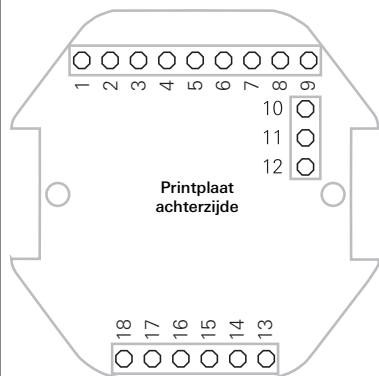

## Aansluitconfiguratie

### Voeding

6	GND	aarde
7	GND	aarde
8	+ 24 V	voedingsspanning
9	+ 24 V	voedingsspanning

### Groepsbus

4	GBUS-	dataleiding (-in)
5	GBUS+	dataleiding (+out)

### Toilet

18	+ 24 V_out	spanning (afgezekerd)
15	RTWC	oproepknop toiletoproep
16	RLWC	oproeplamp toiletoproep
17	ATWC	uitschakelknop toiletoproep

### Kamersignaallamp

18	+ 24 V_out	spanning (afgezekerd)
1	AL1	aanwezigheidslamp groen
2	RL	oproeplamp rood
3	RLWC	oproeplamp toilet wit

### Kamer

18	+ 24 V_out	spanning (afgezekerd)
10	SU	zoemer (out)
11	AT	aanwezigheidsknop
12	AL	LED in aanwezigheidsknop
13	RT	oproepknop (in)
14	RL	LED in oproepknop

Aansluiten op:

Aansluiten van:

Groepsbus

Kamersignaallampen, oproepknop, oproepknop met nevensteekcontact, trekdrukcontact en pneumatische oproepknop, uitschakelknop toiletoproep.

Aanwijzing:

JP 1 op de laatste busdeelnemer sluiten.

Meer informatie:

Bekabeling van de oproepactiveringscomponenten, zie volledige handleiding  
Bekabeling van de oproepuitschakelcomponenten, zie volledige handleiding  
Bekabeling in de kamer, zie volledige handleiding  
Bekabeling in het toilet (natte cel), zie volledige handleiding  
Bekabeling van de groepsbusdeelnemers, zie volledige handleiding  
Beschrijving van de oproepdoorschakelfunctie, zie volledige handleiding